

BlueDiver Dot Polymyositis/Scleroderma12 IgG

Katalogové číslo: PMS12DIV-24

Velikost balení: 24 testů

Skladování: 2-8 °C

Výrobce: D-tek s.a.



Informace o soupravě:

- Každý jednotlivý test obsahuje všechny reagencie (ready-to-use) nezbytné k provedení testu.
- Antigeny jsou nanášeny na membránu, v případě přítomnosti specifických protilátek dochází k jejich vazbě na jednotlivé separované antigeny. V následujících krocích jsou navázané protilátky označeny konjugátem a detekovány barevnou reakcí se substrátem.
- Krátké inkubační doby, celková doba vyšetření je asi 1,15 hod.
- Vyhodnocení pomocí programu Dr. DOT.
- Expirace 12 měsíců od data výroby.

Stručný pracovní postup:

- Vložení testovacích stripů a zásobníků do přístroje BlueDiver.
- Pipetování vzorků.
- Plně automatizované inkubační a promývací kroky v BlueDiver:
 1. Inkubace 30 min.
 2. Promytí 3 × 2 min.
 3. Dávkování Konjugátu.
 4. Inkubace 10 min.
 5. Promytí 3 × 2 min.

6. Dávkování substrátu.
 7. Inkubace 10 min.
 8. Promytí 1 × 2 min.
- Vyhodnocení testu ve skeneru BlueScan pomocí softwaru Dr. DOT.