

## BlueDot Polymyositis/Scleroderma12 IgG

**Katalogové číslo:** PMS12D-24

**Velikost balení:** 24 testů

**Skladování:** 2-8 °C

**Výrobce:** D-tek s.a.



### Informace o soupravě:

- Antigeny jsou nanесeny na membránu, v případě přítomnosti specifických protilátek dochází k jejich vazbě na jednotlivé separované antigeny. V následujících krocích jsou navázané protilátky označeny konjugátem a detekovány barevnou reakcí se substrátem.
- Krátké inkubační doby, celková doba vyšetření je asi 1,5 hod.
- Vyhodnocení pomocí programu Dr. DOT.
- Expirace 12 měsíců od data výroby.

### Stručný pracovní postup:

1. Vložení testovacích stripů do jamek blotovací vaničky.
2. Pipetování vzorků.
3. Inkubace 30 min .
4. Promytí 3 × 3 min.
5. Dávkování Konjugátu.
6. Inkubace 30 min.
7. Promytí 3 × 3 min.
8. Dávkování substrátu.
9. Inkubace 10 min.

10. Promytí 1 × 3 min.
11. Vyhodnocení testu vizuálně nebo pomocí softwaru Dr. DOT.