

## CHORUS PARAINFLUENZA CONTROL SERUM

**EAN kód:** 8033891323028

**Katalogové číslo:** 85893

**Velikost balení:** 0,5 ml

**Skladování:** 2-8 °C

**Výrobce:** DIESSE Diagnostica Senese S.p.A.



### Obecné informace o výrobku:

- Kontrolní materiál na bázi lidského séra obsahující specifické protilátky v deklarovaném titru.
- Slouží k vyhodnocení přesnosti a správnosti použití přístroje Chorus.

### Stručný pracovní postup:

1. Inaktivace kontrolního séra 30 min. při 56 °C.
2. Načtení čárových kódů kontrolního séra a typu testu.
3. Manuální pipetování kontrolního séra.
4. Vložení testu do přístroje.
5. Spuštění přístroje.
6. Tisk výsledků v průběhu 60-90 minut.

Aktuální verzi návodu naleznete na: <http://www.diesse.it/en/Products/linea:41/>