

TRIBUstrip



EAN kód: 8595635303593

Katalogové číslo: Ts0300

Velikost balení: 300 testů

Skladování: 2-8 °C

Výrobce: TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.

Informace o výrobku:

- Principem testu je enzymatická hydrolýza tributyrinu provázená barevnou změnou acidobazického indikátoru.
- Výsledek reakce se odečítá po 18–20 hod.

Složení testu:

- Testovací stripy 300 ks.

Stručný pracovní postup:

1. Přenesení tributyrinového stripu do suspenze testovaného kmene v 1 ml pufrovaného fyziologického roztoku.
2. Inkubace testovaného vzorku při 37 °C (bez CO₂).
3. Odečtení konečného výsledku po 18–20 hod.

Hodnocení testu:

- Negativní reakce: nedošlo ke změně červeného zbarvení na žluté (Neisseria).
- Pozitivní reakce: červené zbarvení ze změnilo na žluté Moraxella (Branhamella).
- TRIBUstrip je dodáván zárodků prostý. Při opakovaném používání chraňte před kontaminací použitím vysterilizované pipety. Podmínkou správné funkce testu je zabránění vstupu vlhkosti při skladování. Nádobka se stripy se nesmí otevírat dříve než dojde k vytemperování, aby nedošlo ke kondenzaci vzdušné vlhkosti na stripech a k jejich orosení.

Skladování a expirace:

- Test skladujte v suchu při laboratorní teplotě. Při dodržení těchto podmínek je expirace 24 měsíců od data výroby.
- Expiraci výrobku je možno prodloužit skladováním při -20 °C.